

空気の
のちからで
心地よい時間を

<販売代理店>

株式会社ベルツリー

担当：鈴木

e-mail: vrc.sales@belltree-corp.com

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-21-13 B2-5

<https://www.belltree-corp.com/>

シャンテ

Shante

Air hand refresher



DENKEN

手には、たくさんのツボがあるって知っていましたか？

そして、手に点在するツボは体全体に繋がっているんです。

シャンテ

Shante

の空気のような加圧でツボを刺激し心も体もリフレッシュしませんか？

こんな方にオススメです!!

■お仕事で手を良く使う方
■疲れが溜まっている方

■毎日の家事で手を良く使う方
■体がストレスを感じている方
■心身ともにリフレッシュしたい方

加圧は
ぎゅーっと押したり
緩めたり…
ランダムな動きで
手のツボを
適度に刺激!

見やすい操作パネル
ボタンは2つだから
操作はとっても簡単です。




ご使用方法は簡単!

- ①操作パネルの『開始/中止』ボタンを押します。
・『開始/中止』ボタンを押すとTIMEの表示部に
残り時間が表示されます。
・強さは弱からスタートします。
- ②両手を挿入口に入れて下さい。
・5秒後に加圧が始まります。

【便利な機能】

☆本機の底面にはスイッチが付いています。
使用中に強さを変えたい場合は、
本機手前側を軽く持ち上げた後、降ろして下さい。
弱→中→強→弱…と強さが変わります。
また、途中で加圧を止めたい場合は、
手前側を **5秒以上** 軽く持ち上げると加圧が中止します。

☆終了後はUVランプで自動的に殺菌消毒します。(5分間)

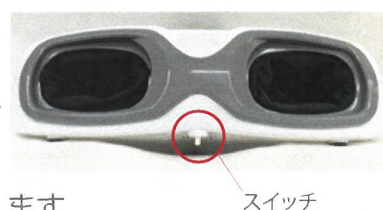

便利な反射区図シール

ご使用後は写真の様に、手のひら
に黒く跡が残ることがあります。
本機には便利な反射区図シールが
付属されていますので、
気軽にヘルスチェック出来ます。
(手のひらの跡は加圧により残った
ものでしばらくすると消失します。)



ご使用後



ご使用の前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

使用上のご注意

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

【禁忌・禁止】

- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。
- 次のような医用電子機器をお使いの方は使用しないでください。
 - ・ペースメーカーなどの体内埋込型医用電子機器。
 - ・人工心臓などの生命維持用医用電子機器。
 - ・心電計などの装着型の医用電子機器。

【その他の注意事項】

- ①次の人は医師とご相談の上、ご使用ください。
 - (1)悪性腫瘍のある人
 - (2)心臓に障害のある人。
 - (3)妊娠中または出産直後の人。
 - (4)体温37℃以上(有熱期)の人。
 - (5)安静を必要とする人。
 - (6)皮膚に異常がある人。
 - (7)骨折、捻挫、肉離れなど、急性
[とう(疼)痛症] 疾患の人。
 - (8)感覚、知覚障害のある人。
 - (9)薬を服用中の人。
 - (10)高血圧症など血圧に異常のある人。
 - (11)手に重度の血行障害のある人。
 - (12)手や爪に外傷のある人。

【希望小売価格】¥129,600(税込)

商品名	Shante (シャンテ)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	35W
定格時間	15分(加圧:10分 殺菌消毒:5分) 10分(加圧:5分 殺菌消毒:5分)
サイズ	145mm(H)×480mm(W)×340mm(D)
重量	約6.5kg
付属品	・電源コード ・取扱説明書(保証書付き) ・専用箱

製造元 株式会社デンケン
〒873-0414
大分県国東市武蔵町手野1560番地
TEL0120-81-1039